

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-typu-dessault-at04004-p-4287.html>

## Orteza na ramię i bark typu "Dessault" - AT04004



Numer katalogowy	<b>AT04004</b>
Producent	<b>Antar</b>

### Opis produktu

**Orteza stabilizująca na bark i ramię AT04004** została wykonana z lekkiej, oddychającej pianki obszytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, co zwiększa komfort użytkownika wyrobu i pozwala łatwo utrzymać higienę. Orteza została zaprojektowana tak, by ułatwić pacjentowi samodzielne założenie i użytkowanie na co dzień. Wyrób posiada szeroki zakres regulacji co zapewnia optymalne zastosowanie niezależnie od okoliczności. Ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej.

Dzięki uniwersalnej taśmie ramienia i podwieszce dłoniowej wyrób może być używany na prawe jak i lewe ramię. Pas ramienny i podwieszka połączone są ze sobą przy użyciu klamry szybkozłącznej co umożliwia zachowanie wcześniejszych ustawień produktu.

#### Zastosowanie:

Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego, ramiennego, w tym złamaniach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu barkowego i łokciowego.

Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Wyrobu nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu lub maści rozgrzewającej. Podczas użytkowania ortezy należy systematycznie kontrolować stan skóry, w przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscach przylegania produktu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

#### Konserwacja i przechowywanie produktu:

- prać wyłącznie ręcznie w letniej wodzie (w temperaturze do 40°C) delikatnym detergentem (np. szare mydło)
- nie prasować,
- nie prać chemicznie,
- nie stosować wybielaczy,
- nie odwirowywać,
- nie suszyć w suszarce bębnowej, lecz w postaci rozłożonej, wycisnąć delikatnie przed suszeniem
- nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury

- 
- chronić przed wilgocią

**W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód w klatce piersiowej (cm)**

XS: 45-60

S: 60-75

M: 75-90

L: 90-110

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS