

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-manumed-t-p-7855.html>



Orteza nadgarstka Manumed T

Numer katalogowy **9765**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza nadgarstka

- Indywidualna regulacja
- Łatwe użycie dzięki systemowi wsuwania
- Materiał przepuszczający powietrze

Orteza nadgarstka z podporą kciuka

Manumed T to orteza stawu nadgarstkowego z wyściółką na kciuk. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu nadgarstkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Zmniejszenie obrzęku, stanu zapalnego i bólu poprzez unieruchomienie nadgarstka i kciuka

Sposób działania

Unieruchomienie i stabilizacja stawu nadgarstkowego, stawu siodełkowego i stawu kciuka.

Instrukcja dotycząca zakładania

Pierwsze założenie ortezy powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny. Aluminiowe szyny dostosowane do budowy łatwo wyciągnąć i dostosować do kształtu stawu nadgarstkowego. Odpiąć wszystkie pasy i wsunąć dłoń w ortezę. Zapiąć najpierw przedni a następnie tylni pas ściągający. Następnie zapiąć szeroki, środkowy pas ściągający. Ten pas jest zapięty rzepowo na górnej stronie ortezy i w razie potrzeby można go przesunąć przed zapięciem. Pasek kciukowy owinąć wokół kciuka.

Wskazówki dotyczące noszenia

Tylko dzięki konsekwentnemu noszeniu ortezy Manumed T przyczynia się Pan/Pani do osiągnięcia pozytywnego rezultatu w terapii.

Skład produktu: Aluminium, Poliamid

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zwinięcie / skręcenie stawu nadgarstkowego i/lub kciuka
- Pooperacyjne unieruchomienie stawu nadgarstkowego i kciuka
- Uszkodzenie więzadła pobocznego stawu kciuka
- Zapalenie ścięgien i tendinopatia stawu nadgarstkowego i kciuka
- Okresy zapalne w przypadku schorzeń reumatycznych

Przeciwwskazania

- Niestabilne złamania w okolicy dłoni.

Rozmiar

obwód nadgarstka (cm)	do 14	14 - 18	19 - 23	24 - 28
rozmiar	0	I	II	III
numer artykułu	R.110.Δ0	R.110.Δ1	R.110.Δ2	R.110.Δ3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , I , II , III

Kolor: czarny , szary

TYP: lewy , prawy