

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-manumed-tri-p-7854.html>



Orteza nadgarstka Manumed tri

Numer katalogowy **9764**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza nadgarstka

- Indywidualna regulacja
- Łatwe użycie dzięki systemowi wsuwania
- Bardzo wygodna w noszeniu

Orteza nadgarstka do ograniczenia pronacji i supinacji

Manumed tri to orteza stawu nadgarstkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu nadgarstkowego.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Ograniczenie nadgarstka w trzech stopniach ruchu: zginanie/prostowanie, odwodzenie/przywodzenie, pronacja/supinacja
- Zmniejszenie bólu związanego z ruchem poprzez stabilizację nadgarstka

Sposób działania

Nadgarstek jest unieruchomiony w sześciu płaszczyznach ruchu, ograniczając supinację i pronację (rotację przedramienia).

Instrukcja dotycząca zakładania

Szyna jest już wstępnie ukształtowana anatomicznie. Technik ortopedyczny dopasowuje ją dokładnie do kształtu ręki.

Boczne prowadnice na przedramieniu, na nadgarstku i na kłębie dłoni dogina się w ten sposób, aby przylegały.

Przedramie należy włożyć do ortezy.

Następnie proszę zapiąć wszystkie paski.

Wskazówki dotyczące noszenia

Szyna jest już wstępnie ukształtowana anatomicznie. Technik ortopedyczny dopasowuje ją dokładnie do kształtu ręki. Boczne prowadnice na przedramieniu, na nadgarstku i na kłębie dłoni dogina się w ten sposób, aby przylegały. Przedramie należy włożyć do ortezy. Następnie proszę zapiąć wszystkie paski.

Skład produktu: Szyna składa się z aluminium, pasy i materiał wierzchni z weluru.

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Unieruchomienie przy skręceniach
- Podrażnienie tkanek miękkich (chroniczne, pourazowe, pooperacyjne)
- Skutki porażenia (niedowład nerwu promieniowego)
- Zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgniastej

Przeciwwskazania

- Dotychczas nieznanne.

Rozmiar

obwód nadgarstka (cm)
rozmiar
numer artykułu

14 - 18 19 - 23
I II
R.111.◇01 R.111.◇02

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II

Kolor: szary

TYP: lewy , prawy