

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-z-szyna-manumed-p-7853.html>



Orteza nadgarstka z szyną Manumed

Numer katalogowy **9763**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza nadgarstka z szyną

- Indywidualna regulacja
- Łatwe użycie dzięki systemowi nasuwania
- Bardzo wygodna w noszeniu

Orteza nadgarstka z szyną

Manumed to orteza stawu nadgarstkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu nadgarstkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Zmniejszenie obrzęku i stanu zapalnego poprzez unieruchomienie nadgarstka
- Zmniejszenie bólu związanego z ruchem poprzez stabilizację dłoni

Sposób działania

Unieruchomienie i stabilizacja nadgarstka przy pomocy aluminiowej szyny.

Instrukcja dotycząca zakładania

Założenie opaski po raz pierwszy powinno odbywać się według wskazań przeszkolonego specjalistycznego personelu. Uformowana fabrycznie szyna aluminiowa jest wyjmowana, a jej kształt daje się łatwo dopasować do różnych kształtów nadgarstka.

Odpiąć wszystkie paski i wsunąć dłoń w opaskę tak, aby szyna aluminiowa znajdowała się pod spodem.

Zapiąć przedni a następnie tylny pasek regulujący.

Następnie zapiąć szeroki środkowy pasek regulujący.

Pasek ten przyczepiony jest na rzep do spodu opaski i w razie potrzeby można go przesunąć przed zapięciem.

Wskazówki dotyczące noszenia

Tylko konsekwentne noszenie opaski Manumed może przyczynić się do udanego przebiegu leczenia.

Skład produktu: Aluminium, Poliamid

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Unieruchomienie przy skręceniach
- Podrażnienie tkanek miękkich (chroniczne, pourazowe, pooperacyjne)
- Skutki porażenia (niedowład nerwu promieniowego)
- Zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgnistej

Przeciwwskazania

- Dotychczas nieznanne.

Rozmiar

obwód nadgarstka (cm)	do 14	14 - 18	19 - 23	24 - 28
rozmiar	0	I	II	III
numer artykułu	R.110.Δ0	R.110.Δ1	R.110.Δ2	R.110.Δ3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , I , II , III

Kolor: czarny , szary

TYP: lewy , prawy