

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-bark-medi-sas-45-p-7844.html>



Orteza odwodząca bark medi SAS® 45

Numer katalogowy **9754**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza odwodząca bark

- Ćwiczenie przedramienia przez podpórkę dłoni
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wczesna funkcjonalna opieka po leczeniu

Szyna odwodząca bark – odwiedzenie 45° lub 30°

medi SAS 45 to orteza odwodząca stawu barkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Pozycja boczna z anatomicznie ukształtowaną poduszką w celu odciążenia rąbka brzuszego i torebki stawowej
- Odciąża przestrzeń podbarkową
- Pozycja w odwiedzeniu 30° lub 45° w celu uniknięcia zrostów do dołu pachowego (zamrożony bark)

Instrukcja dotycząca zakładania

Ortezę medi SAS 45 można stosować zarówno po prawej jak i po lewej stronie.

Poluzować wszystkie paski wraz z elementem ręcznym

Następnie położyć poduszkę przy biodrze po stronie uszkodzonego ramienia a pas barkowy nałożyć na przeciwny bark.

Następnie zapiąć rzepami pas najpierw na tylnej a następnie na przedniej stronie poduszki. Następnie przymocować pas biodrowy do przedniej strony poduszki. Owinąć wokół ciała i przymocować poduszkę.

Później przypiąć rzepami do przedniej strony poduszki podpórkę na rękę.

Przymocować oba paski przedramienia do podpórki na rękę a pas ramienia lekko po skosie do poduszki. Zablokować pas przedramienia w ten sposób, aby ramię nie obsuwało się w dół.

Włożyć ramię do środka i zapiąć rzepami wszystkie paski. Zwrócić uwagę na to, aby paski nie były zbyt mocno zamknięte.

Poprzez obrót poduszki można uzyskać zmianę ustawienia kąta stawu z 45° do 30°.

Uwaga: Zwrócić uwagę, aby na skutek ułożenia ramienia przy wyjściu głowy kości ramiennej nie była wysunięta do góry!

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ustawienia kąta stawu możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Skład produktu: Pianka PU, Poliamid

Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie.

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki mydła, kremu lub maści mogą spowodować podrażnienia skóry i zużycie materiału.

Poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej prać ręcznie przy użyciu środka do mycia medi clean lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Po zabiegach akromioplastyki
- Leczenie zachowawcze lub pooperacyjne przy ostrym chronicznym zapaleniu kaletki stawu barkowego
- Leczenie zachowawcze przy pierwszym zwicnięciu w stawie barkowym
- Unieruchomienie po implantacji protezy barkowej
- Pooperacyjnie po zabiegach rekonstrukcji mankietu rotatorów
- Po stabilizacji barku

Przeciwwskazania

- Dotychczas nieznanne.

Rozmiar

obwód pasa (cm)

rozmiar

numer artykułu

do 104 powyżej 105

S L

R.021.002 R.021.004

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S

Kolor: szary