

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-bark-medi-sas-45-p-7844.html>



## Orteza odwodząca bark medi SAS® 45

Numer katalogowy **9754**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza odwodząca bark

- Ćwiczenie przedramienia przez podpórkę dłoni
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wczesna funkcjonalna opieka po leczeniu

### Szyna odwodząca bark – odwiedzenie 45° lub 30°

medi SAS 45 to orteza odwodząca stawu barkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Pozycja boczna z anatomicznie ukształtowaną poduszką w celu odciążenia rąbka brzuszego i torebki stawowej
- Odciąża przestrzeń podbarkową
- Pozycja w odwiedzeniu 30° lub 45° w celu uniknięcia zrostów do dołu pachowego (zamrożony bark)

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Ortezę medi SAS 45 można stosować zarówno po prawej jak i po lewej stronie.

Poluzować wszystkie paski wraz z elementem ręcznym

Następnie położyć poduszkę przy biodrze po stronie uszkodzonego ramienia a pas barkowy nałożyć na przeciwny bark.

Następnie zapiąć rzepami pas najpierw na tylnej a następnie na przedniej stronie poduszki. Następnie przymocować pas biodrowy do przedniej strony poduszki. Owinąć wokół ciała i przymocować poduszkę.

Później przypiąć rzepami do przedniej strony poduszki podpórkę na rękę.

Przymocować oba paski przedramienia do podpórki na rękę a pas ramienia lekko po skosie do poduszki. Zablokować pas przedramienia w ten sposób, aby ramię nie obsuwało się w dół.

Włożyć ramię do środka i zapiąć rzepami wszystkie paski. Zwrócić uwagę na to, aby paski nie były zbyt mocno zamknięte.

Poprzez obrót poduszki można uzyskać zmianę ustawienia kąta stawu z 45° do 30°.

Uwaga: Zwrócić uwagę, aby na skutek ułożenia ramienia przy wyjściu głowa kości ramiennej nie była wysunięta do góry!

---

## Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ustawienia kąta stawu możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

**Skład produktu:** Pianka PU, Poliamid

## Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie.

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki mydła, kremu lub maści mogą spowodować podrażnienia skóry i zużycie materiału.

Poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej prać ręcznie przy użyciu środka do mycia medi clean lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Po zabiegach akromioplastyki
- Leczenie zachowawcze lub pooperacyjne przy ostrym chronicznym zapaleniu kaletki stawu barkowego
- Leczenie zachowawcze przy pierwszym zwicnięciu w stawie barkowym
- Unieruchomienie po implantacji protezy barkowej
- Pooperacyjnie po zabiegach rekonstrukcji mankietu rotatorów
- Po stabilizacji barku

## Przeciwwskazania

- Dotychczas nieznanne.

## Rozmiar

obwód pasa (cm)

rozmiar

numer artykułu

do 104 powyżej 105

S L

R.021.002 R.021.004

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , S

**Kolor:** szary