

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-przeprostowa-medi-3-c-p-7832.html>



Orteza przeprostowa medi 3 C®

Numer katalogowy **9742**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza przeprostowa

- Łatwe użycie dzięki zapięciu zapadkowemu
- Przyjazna dla skóry i niezawierająca niklu
- Adaptacja do ruchów ciała

3-punktowa orteza przeprostowa z zapięciem zapadkowym

medi 3 C jest ortezą hiperprzeprostną.

Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne kręgosłupa na odcinku lędźwiowym/piersiowym oraz jedynie na nieuszkodzonej skórze.

Zalety produktu

- Wyprost kręgosłupa (odcinek piersiowo-lędźwiowy)

Instrukcja dotycząca zakładania

Kierując się objętością w talii należy wybrać określony model podstawowy. W celu określenia długości płaskownika mostkowego należy ustalić u pacjenta długość odcinka od wysokości górnego brzegu kości łonowej do miejsca poniżej stawów mostkowo obojczykowych.

Aby dokonać ustawienia długości w obrębie należy, trzeba poluzować śruby w płytce podstawy. Długość należy ustawić przy całkowicie rozsuniętej pelocie mostkowej od górnej do dolnej krawędzi. Należy pamiętać o tym, aby pas taliowy leżał powyżej grzebienia biodrowego. Następnie należy ustawić płaskownik łonowy i mostkowy. Stopień wyprostowania można dopasować indywidualnie.

Ustalić położenie peloty grzbietowej i zamontować pas taliowy.

Płaskownik mostkowy oraz boczne przedłużenia płytki podstawy można ręcznie uformować odpowiednio do kształtu ciała

poprzez powolne ich zginanie na kolanie lub oparciu krzesła. Jeżeli niezbędne jest użycie rozwieraczy, najlepiej użyć okrągłych! Płaskownika mostkowego nie należy wyginać w obrębie ruchu peloty mostkowej. W celu zabezpieczenia przed takim wygięciem należy zdjąć pelotę mostkową z płaskownika mostkowego.

Aby nastawić pelotę, należy wsunąć do otworu nakrętkę tulejową i mocno ściągnąć śrubą. Zaleca się zabezpieczenie śruby preparatem Loctite.

Sprawdzić położenie peloty. Pelota mostkowa sięga w stanie hiperekstensji górną krawędzią poniżej stawów mostkowo-obojęczykowych. Kontur mostkowy można wymodelować ręcznie. Pelota łonowa zamyka się dolną krawędzią na górnym brzegu kości łonowej. Dolną część peloty należy wygiąć na zewnątrz.

Należy upewnić się, czy wszystkie śruby zostały dokręcone.

Następnego dnia zaleca się sprawdzenie funkcjonowania ortezy hiperekstensyjnej medi 3 C w celu ewentualnego jej wyregulowania.

Skład produktu: Aluminium, Polietylen (pianka), Bawełna (pokrycia)

Instrukcja prania

Ortezę można używać zarówno w słodkiej jak i słonej wodzie. W tym celu należy zdjąć bawełniane pokrowce z nakładki. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Po użyciu wypłukać ortezę w czystej wodzie.

Do prania wyściółki i pokrycia najlepiej używać środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Stabilne złamania kompresyjne odcinka piersiowego oraz lędźwiowego kręgosłupa
- Hiperkifoza przy młodzieńczej chorobie Scheurmannna
- Do leczenia zachowawczego przy nieoperacyjnych złamaniach trzonu kręgu w odcinku lędźwiowym i odcinku piersiowym kręgosłupa
- Do pooperacyjnego czasowego zaopatrzenia orteżą

Przeciwwskazania

- Niestabilne złamania odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z ubytkami i bez ubytków neurologicznych.

Rozmiar	normalny mostkowy drążek	długość torsu	obwód pasa (cm)	numer artykułu
	27 cm			
	małe bazowe podpórki	45 - 53 cm	55 - 90 cm	5.6C0.001
	duże bazowe podpórki	45 - 53 cm	91 - 125 cm	5.6C0.002

	normalny mostkowy drążek 20 cm	długość torsu	obwód pasa cm	numer artykułu
	małe bazowe podpórki	37 - 45 cm	55 - 90 cm	5.6C7.001
	duże bazowe podpórki	37 - 45 cm	91 - 125 cm	5.6C7.002

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: srebrny

Wysokość: 20 cm , 27 cm

Wariant: duże bazowe podpórki , małe bazowe podpórki

