

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-rzepki-stabilizujaca-pt0315-p-2654.html>



Orteza rzepki stabilizująca PT0315

Numer katalogowy	PT0315
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE

- stabilizuje i odciąża rzepkę
- działa wspomagająco w nawykowym zwichnięciu rzepki
- wspiera rekonwalescencję po przebytych urazach rzepki leczonych zachowawczo lub operacyjnie

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

Wyrób produkowany jest w rozmiarze uniwersalnym.

Zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Nałożyć ortezę na nogę, na wysokość stawu, aby wzmocnienie przypadało z przodu pod rzepką. Zapiąć taśmę na rzep, regulując indywidualnie ucisk.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzep w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

-
- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
 - O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
 - W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
 - Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
 - Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
 - Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
 - Wyrób zaپیęty zbyt ciasno może pogorszyć krążenie krwi.
 - Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
 - Wyrób przeznaczony jest do stosowania podczas ruchu (na czas długotrwałego siedzenia należy zdjąć wyrób).