

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-kregoslup-ledzwiowy-lumbamed-basic-p-7823.html>



Orteza stabilizująca kręgosłup lędźwiowy Lumbamed® basic

Numer katalogowy **9733**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza stabilizująca kręgosłup lędźwiowy

- Zintegrowane grzbietowe elementy stabilizujące
- Łatwe użycie dzięki zintegrowanym szlufkom na dłonie
- Wygodne otwarcie dzięki trójkątnej szlufce na palce

Do leczenia bólu krzyża (lumbago) spowodowanego zaburzeniami stawu międzywyrastkowego

Lumbamed plus to orteza lędźwiowa z peloty. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Stabilizacja odcinka lędźwiowego i połączenia lędźwiowo-krzyżowego za pomocą czterech zintegrowanych grzbietowych elementów stabilizujących
- Zmniejszenie lordozy odcinka lędźwiowego za pomocą ucisku proprioceptywnego w obszarze brzuszny

Sposób działania

Pierwsze zakładanie ortezy powinno odbyć się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu specjalistycznego. Dzięki optymalnemu połączeniu uciskowego materiału i wbudowanych usztywniaczy chroniących plecy pas Lumbamed basic działa stabilizująco na okolice lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz obszar graniczący z miednicą nie wpływając negatywnie na siłę mięśni.

Pas poprawia właściwości statyczne kręgosłupa oraz odciąża fragmenty kręgosłupa szczególnie narażone na niekorzystne oddziaływania łagodząc w ten sposób uczucie bólu.

Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Specjalny kształt w obrębie pachwiny (Comfort Zone) znacznie poprawia prawidłowe i wygodne położenie opaski. Decyzję o czasie noszenia opaski należy podjąć na podstawie własnych odczuć. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu. Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać

Instrukcja dotycząca zakładania

Na etykiecie znajdującej się po prawej wewnętrznej stronie zapięcia przedstawiono, jak należy zakładać ortezę. Wsunąć dłoń w pętlę po lewej wewnętrznej stronie zapięcia. Owinąć bandaż wokół ciała i wsunąć dłoń w zewnętrzną pętlę z prawej strony. Nałożyć jedną stronę zapięcia na drugą i zapiąć rzep pośrodku. Bandaż jest prawidłowo założony, jeśli dolna krawędź zapięcia znajduje się tuż powyżej kości łonowej. Przy zdejmowaniu bandaża pomocna jest mała klapka na palec znajdująca się przy krawędzi prawej strony zamknięcia. Najlepszą przepuszczalność powietrza w tkaninie Clima Comfort daje noszenie bandaża bezpośrednio na skórze.

Skład produktu: Poliamide, Poliester, Elastan, Wiskoza

Instrukcja prania

Paski z rzepami należy przed praniem zapiąć. Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje i maści mogą uszkodzić materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Nieswoiste bóle w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Bóle w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa spowodowane zużyciem tkanki
- Podrażnienia stawu biodrowo-krzyżowego
- Objawy przeciążenia na obszarze pomiędzy odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa a miednicą
- Słabe lub niedostatecznie rozwinięte mięśnie tułowia (plecy, brzuch)
- Rozejście spojenia łonowego

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).

Rozmiar

Damski					
obwód bioder (cm)	76 - 86	86 - 98	98 - 111	111 - 125	125 - 140
rozmiar damski	I	II	III	IV	V
numer artykułu	K.200.Δ41	K.200.Δ42	K.200.Δ43	K.200.Δ44	K.200.Δ45

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny, 8 = piaskowy

Męski

obwód pasa (cm)	66 - 76	76 - 88	88 - 101	101 - 115	115 - 130
rozmiar damski	I	II	III	IV	V
numer artykułu	K.200.Δ31	K.200.Δ32	K.200.Δ33	K.200.Δ34	K.200.Δ35

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny, 8 = piaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V

Kolor: piaskowy , srebrny

TYP: Damski , Męski