

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-kregoslup-lumbamed-active-p-7824.html>



## Orteza stabilizująca kręgosłup Lumbamed® active

Numer katalogowy **9734**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza stabilizująca kręgosłup lędźwiowy

- Łatwe użycie dzięki zintegrowanym szlufkom na dłonie
- Przepuszczająca powietrze tkanina

### Orteza lędźwiowa z przepuszczającej powietrze tkaniny

Lumbamed active to orteza lędźwiowa.

Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Odciążenie odcinka lędźwiowego poprzez efekt stabilizujący
- Ucisk proprioceptywny zmniejsza napięcie mięśniowe i łagodzi ból

#### Sposób działania

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa zostaje odczuwalnie odciążony, a mięśnie grzbietu wsparte. Bóle w krzyżu i - naprężenia mięśnie są łagodzone.

Zawarte w bandażu 4 anatomicznie uformowane sprężyny napinające o zadanym kącie pochylenia 35 ° mogą być indywidualnie ustawiane, tak że zapewnione jest doskonałe dopasowanie do anatomii obszaru krzyżowo lędźwiowego. Dzięki specjalnemu składowi nowoczesnego materiału podszewki wilgoć jest szybko i w całości przenoszona z powierzchni ciała na stronę zewnętrzną pasa.

Nawet przy ślonym poceniu się zapewniony zostaje komfort noszenia.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Bandaż należy owinąć dookoła ciała. W tym celu palce należy włożyć w przeznaczone do tego pętelki.

---

Następnie lewą stroną zapięcia przyciskamy do brzucha a prawą stroną zapięcia nakładamy na nią na taką odległość, aby ich powierzchnie się sczepiły  
Rozpinając najpierw wyjąć palce z lewej a następnie z prawej pętelki.  
Zawsze ubiewamy bandaża pod ubranie.

**Skład produktu:** Poliester, Poliamid, Eelastan, Skóropodobna, Bawełna

### Instrukcja prania

Paski z rzepami należy przed praniem zapiąć. Środki zmiękczające, oleje, mleczka i maści mogą uszkodzić materiał gorsetu. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.  
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Ostrzał spowodowany zaburzeniami małych stawów kręgowych
- Statomotoryczno-mięśniowy dysbalans w obszarze lędźwiowym
- Urazy więzadeł
- Zespół dyskopatii
- Lekkie rozluźnienie struktury odcinka lędźwiowego np. w ramach choroby kości, zeszywnienie kręgosłupa oraz zapalenie stawów kręgosłupa

### Przeciwwskazania

- Dotychczasowo nieznane

### Rozmiar

obwód w pasie (cm)	70 - 82	82 - 95	95 - 108	108 - 121	121 - 134
rozmiar	I	II	III	IV	V
numer artykułu	K.230.Δ01	K.230.Δ02	K.230.Δ03	K.230.Δ04	K.230.Δ05

Δ = uzupełnić kolor: 7 = biały, 5 = czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V

**Kolor:** biały , czarny