

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-barkowego-pt0233-p-2649.html>



Orteza stawu barkowego PT0233

Numer katalogowy	PT0233
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wspomaga rekonwalescencję w przeciążeniach ścięgien, naciągnięciach więzadeł oraz w nawykowych zwichnięciach stawu barkowego
- łagodzi zespoły bólowe, zmniejsza obrzęk
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu i zapobiega kontuzjom
- ma działanie ocieplające
- przyspiesza leczenie obrażeń stawu

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód ręki nad łokciem [cm]	22 - 24	25 -29	30 -34	35 - 40	>40

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Ortezę założyć poprzez naciągnięcie od dołu na wysokość stawu barkowego, następnie przełożyć taśmę zapinającą wokół tułowia i zapiąć na rzep. Obwód ortezy dopasować, regulując indywidualnie zapięciem na rzep wokół ramienia.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL