

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-medi-pt-control-p-7872.html>



Orteza stawu kolanowego medi PT control®

Numer katalogowy **9782**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z ograniczeniem prostowania/zginania

- Bezpieczne dopasowanie dzięki zawiasowi Physioglide
- Działanie proprioceptywne dzięki precyzyjnej kompresji
- Duży komfort dzięki medi Airtex+

Miękka orteza do stabilizacji rzepki

medi PT control jest ortezą stosowaną w przypadku zwichnięcia rzepki.

Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- physioglide TF: nowa konstrukcja zawiasu pozwalająca na wymianę klinów bez użycia narzędzi – z użyciem pęsety w każdej osłonie zawiasu.
- physioglide zawias Unikalny policentryczny zawias, który ściśle naśladuje ruchy kolana.
- lepszy poślizg rzepki dzięki indywidualnie regulowanemu stabilizatorowi rzepki i poduszce powietrznej.
- dostępna również w wersji zawijanej doskonale dopasowanie dzięki zastosowanym w wersji zawijanej zamknięciom rzepkowym umieszczonym z przodu.

Sposób działania

- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego
- ochrona przed hiperekstensją i ograniczenie ruchu
- korekcja złego bocznego ustawienia rzepki poprzez prowadnicę
- miękka orteza z efektem kompresyjnym i proprioceptycznym

-
- możliwość ograniczenia prostowania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - możliwość ograniczenia zginania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - możliwość unieruchomienia pod kątem 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Instrukcja dotycząca zakładania

Rozpiąć wszystkie paski, tak aby nie utrudniały zakładania ortezy.

Ugiąć nogę do pozycji pod kątem 30° i naciągnąć ortezę na nogę.

Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana znajdowała się w pozycji centralnej w wyźłobieniu na rzepkę. Środki zginaczy ortezy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolana i nieznacznie z tyłu za boczną linią symetrii nogi.

Paski zapiąć w następującej kolejności:

- tylny pasek podudzia
- tylny dolny pasek udowy
- paski na rzepkę, tak aby rzepka była wyprowadzona z zewnątrz do wewnątrz
- zwrócić uwagę, aby poduszki powietrzne przylegały z boku do rzepki i nie naciskały z przodu na rzepkę
- tylny górny pasek udowy
- przedni pasek udowy
- przedni pasek podudzia.

Jeżeli to możliwe, przebiec parę metrów i ponownie sprawdzić prawidłowe osadzenie ortezy. W razie potrzeby skorygować osadzenie ortezy na nodze.

Wskazówki dotyczące noszenia

Ustawianie ograniczników fleksyjnych i ekstensyjnych.

Wyknoać to może tylko technik ortopedyczny (dokonuje wyłącznie technik ortopedyczny).

Skład produktu: Avional, Poliamid, Elastan, PU

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zwknięcie rzepki leczone zachowawczo lub operacyjnie w powiązaniu z lekką i średnią niestabilnością kolana
- Zaburzenia toru ruchu rzepki (malalignment) w przedziale bocznym w powiązaniu z lekką i średnią niestabilnością kolana
- Po bocznym operacyjnym uwolnieniu rzepki
- Pozarzępkowa chirurgia chrząstki stawowej

Przeciwwskazania

- Brak

Rozmiar

obwód uda (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL

numer artykułu G.14□.◇01 G.14□.◇02 G.14□.◇03 G.14□.◇04 G.14□.◇05 G.14□.◇06

□ = Wypełnić dla wariantu: 2= medi PT control, 3= medi PT control wrap /

◇ = Uzupełnić orientację: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

TYP: lewy , prawy , zwijany