

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-otwarta-pt0312-p-2651.html>



Orteza stawu kolanowego - otwarta PT0312

Numer katalogowy	PT0312
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- we wczesnych stanach zwyrodnieniowych
- podczas rehabilitacji
- w nieznacznych niestabilnościach kolana, doleczenie po urazach i kontuzjach
- w celu zapobiegania kontuzjom u sportowców (np. zwichnięcia stawu kolanowego)
- w nawykowych i pourazowych podwichnięciach rzepki

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 61	62 - 68

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Nałożyć ortezę na nogę, na wysokość stawu kolanowego, umieszczając rzepkę w otworze ortezy. Zapiąć z tyłu na rzep, regulując indywidualnie ucisk.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL