

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-ograniczeniem-prostowania/zginania-collamed-p-7870.html>



Orteza stawu kolanowego z ograniczeniem prostowania/zginania Collamed®

Numer katalogowy **9780**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z ograniczeniem prostowania/zginania

- Bezpieczne dopasowanie dzięki zawiasowi Physioglide
- Działanie proprioceptywne dzięki precyzyjnej kompresji
- Duży komfort dzięki medi Airtex+
-

Długa, funkcjonalna orteza miękka z ograniczeniem zginania/prostowania

Collamed jest miękką ortezą stawu kolanowego z ogranicznikiem prostowania i zginania. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Optymalna stabilizacja dzięki 4-punktowej zasadzie
- Bezpieczna oboczna stabilizacja dzięki twardej ramie
- Ograniczenie prostowania i zginania chroni przed szkodliwymi ruchami stawu i odciąża uszkodzone struktury
- Poprawa propriocepcji w celu poprawy samodzielnego prowadzenia i stabilizacji stawu kolanowego
- Zapobieganie przeprostowi

Sposób działania

- dobra stabilizacja dzięki 4-punktowemu systemowi
- ochrona przed hiperekstensją i ograniczenie ruchu poprzez regulowany zawias physioglide
- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego poprzez długie szyny
- miękka orteza z efektem kompresyjnym i proprioceptycznym
- możliwość ograniczenia prostowania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

- możliwość ograniczenia zginania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- możliwość unieruchomienia pod kątem 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- możliwość noszenia na prawej lub lewej

Instrukcja dotycząca zakładania

Rozpiąć wszystkie paski i obydwa paski z rzepami. Obydwie dołączone plastikowe płytki włożyć między pas a prowadnicę pasa. Wyciągnąć górne paski nieznacznie do tyłu, tak aby nie utrudniały zakładania ortezy.

Nogę ustawić w pozycji zgiętej pod kątem ok. 45°. Ortezę mocno owinąć wokół nogi i zapiąć obydwa paski z rzepami. Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana znajdowała się w pozycji centralnej w wyżłobieniu na rzepkę. Środki zginaczy ortezy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolana i nieznacznie z tyłu za boczną linią symetrii nogi.

Zapiąć najpierw przedni dolny pasek podudzia (Rysunek 4), a następnie tylny dolny pasek.

Następnie zapiąć górny pasek udowy i wyjąć plastikowe płytki. Potem zapiąć przedni pasek bezpośrednio pod rzepką kolana i odpowiadający mu tylny pasek.

Na koniec zapiąć dolny pasek udowy i również stąd wyjąć plastikowe płytki.

Jeżeli to możliwe, przebiec parę metrów i ponownie sprawdzić prawidłowe osadzenie ortezy. W razie potrzeby skorygować osadzenie ortezy na nodze.

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ograniczników fleksyjnych i ekstensyjnych możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Aby uniknąć nadmiernego wydłużenia ortezy muszą być zawsze założone kliny ekstensyjne lub kliny o kącie 0°. Kliny określają w dokładny sposób promień dopuszczalnego zakresu ruchu ortezy.

W przypadku dolegliwości tkanki miękkiej w wyniku jej ściśnięcia koniecznym może się okazać zastosowanie większego ogranicznika, tak aby ograniczyć promień ruchu kolana do pożądanej wartości.

Należy również pamiętać, aby przeguby ortezy znajdowały się we właściwej pozycji: środek przegubów powinien znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolanowej. Przegub powinien być usytuowany za boczną linią symetrii nogi.

Skład produktu: Avional, Poliamid, Elastan, Polister

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze więzadeł pobocznych
- Lekkie niestabilności więzadła krzyżowego
- Ograniczenie ruchu po zeszczeniu łąkotki
- Zabiegi rekonstrukcyjne po zwknięciu rzepki
- Chroniczne niestabilności
- Pourazowe lub zwyrodnieniowe zmiany stawu kolanowego

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nieznanne.

Rozmiar

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| obwód uda (cm) | 31 - 37 | 37 - 45 | 45 - 51 | 51 - 57 | 57 - 65 | 65 - 74 | 74 - 84 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| numer artykułu | G.060.141 | G.060.142 | G.060.143 | G.060.144 | G.060.145 | G.060.146 | G.060.147 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: szary