

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-zakresu-ruchu-opl482-opl483-p-2551.html>



Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchu OPL482 – OPL483

Numer katalogowy **OPL482 – OPL483**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, całkowicie rozcięty z przodu, anatomicznie wyprofilowany rękaw ortezy, wyprofilowane anatomicznie policentryczne szyny boczne, które posiadają zegar pozwalający na ustawienie zakresu ruchu w stawie (0-15-30-60-90 stopni), górne i dolne taśmy dociągowe.

Zastosowanie:

choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów, kontuzje w obrębie torebki stawowej i więzadeł, chroniczne niestabilności, niestabilność boczna stawu kolanowego - szpotawość lub koślawość, schorzenia wymagające kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym, leczenie pooperacyjne i pourazowe.

Dobór:

produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

Dopasowanie:

1. Rozpiąć paski znajdujące się w górnej i dolnej części ortezy, uwalniając ich zapięcia micro-velcro.
2. Otworzyć cztery taśmy owijane dookoła uda i podudzia, odpinając w tym celu odpowiednie zapięcia micro-velcro.
3. Założyć ortezę od tyłu na wysokości kolana w taki sposób, aby mechanizmy przegubowe ustawione były równolegle względem siebie i oś ortezy pokrywała się z osią anatomiczną kończyny. Przed dopasowaniem należy wyregulować zakres ruchu zgięcia-wyprostu. W tym celu otwieramy pokrywę przegubu, uzyskując w ten sposób dostęp do trzpieni ograniczających, które wyciągamy i po wybraniu żądanej pozycji, ponownie wkładamy (przewidziano możliwość regulacji kąta zgięcia i wyprostu w przedziałach: 0-15-30-60-90 stopni), a na końcu zamykamy pokrywę.
4. Zapiąć cztery taśmy udowe i podudziowe, odpowiednio przymocowując ich zapięcia micro-velcro.
5. Zapiąć oba paski w górnej i dolnej części ortezy, przeciągając je przez odpowiednie sprzączki.

Kolor:OPL482 czarny // OPL483 beżowy

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3	4
Obwód kolana (cm)	49-55	55-62	62-71	71-82

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4