

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-polotwarta-pt0314-p-2653.html>



Orteza stawu kolanowego z szynami - półotwarta PT0314

Numer katalogowy	PT0314
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zabezpiecza przed kontuzjami stawu kolanowego podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego
- wzmacnia staw, zmniejsza ryzyko powstania ponownej kontuzji
- przyspiesza leczenie kontuzji
- koryguje oś stawu i odciąża powierzchnie stawowe kłykci uda i piszczeli po przebytych złamaniach
- stabilizuje bocznie staw, nie ogranicza ruchów
- zapobiega przeciążeniom aparatu więzadłowo-torebkowego
- łagodzi bóle

Orteza półotwarta, istnieje możliwość regulacji w górnej części - umożliwia to dopasowanie produktu do zmieniających się obwodów kończyny.

Otwór na rzepkę powoduje zniesienie docisku rzepki na kłykcie kości udowej.

Otwór okolicy dołu podkolanowego zapewnia komfort zginania w stawie.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 61	62 - 68

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Naciągnąć ortezę na nogę na wysokość stawu, aby wzmocnienie przypadało wokół rzepki, szyny boczne po bokach stawu kolanowego, a otwór w dole podkolanowym z tyłu. Zapiąć rzep, regulując na obwodzie uda, a następnie zapiąć górną i dolną taśmę dociągając na rzep regulując, indywidualnie ucisk.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL