

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-z-tasmami-stabilizujaca-pt0327-p-2656.html>



## Orteza stawu kolanowego z taśmami stabilizująca PT0327

Numer katalogowy	<b>PT0327</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego i rzepki
- niestabilność boczna kolana, uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL
- po rekonstrukcji więzadeł kolana, po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia)

Doskonała stabilizacja rzepki - dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanego wzmocnienia.

Dodatkowe wzmocnienie więzadeł krzyżowych - dzięki zastosowaniu przedniego zapięcia krzyżowego.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 61	62 - 68

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

#### Sposób zakładania:

Odpiąć rzepę. Ortezę wciągnąć na wysokość stawu kolanowego tak, by dokładnie dopasować otwór na rzepkę kolanową. Zapiąć krzyżowo elastyczne taśmy dociskające, a następnie zapiąć taśmy przednie dociskające, regulując indywidualnie ucisk.

#### Przepis prania:

---

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL