

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-ze-stalkami-pt0325-p-2670.html>



## Orteza stawu kolanowego ze stalkami PT0325

Numer katalogowy	<b>PT0325</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w zespołach bólowych i obrzękach
- w przewlekłych pourazowych i pooperacyjnych stanach zapalnych
- podczas rehabilitacji
- w celu wzmocnienia i bocznej stabilizacji stawu
- w profilaktyce urazów i przeciążeń, ochrona przed kontuzjami stawu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego lub uprawiania sportu

**Orteza jest profilowana anatomicznie.**

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 63

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

#### Sposób zakładania:

Naciągnąć ortezę na nogę, na wysokość stawu kolanowego tak, aby stalki i wewnętrzne taśmy z silikonem przypadły po bokach kolana. Silikonowy system antypoślizgowy pomaga zapobiegać opuszczaniu się ortozy i zbieraniu dzianiny w dole podkolanowym oraz podnosi komfort użytkowania, bez konieczności częstego poprawiania położenia miękkiej ortozy.

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:****Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL