

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-lokciowego-z-regulacja-kata-zgięcia-z-ujęciem-reki-lub-bez-humertec-94301-di-p-2454.html>



## Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez HUMERTEC® 94301 D/I

Numer katalogowy **94301 D/I**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator składa się z dwóch części połączonych monocentrycznymi szynami bocznymi, które pozwalają na regulację kątową zgięcia i wyprost, w zakresie od 0 do 90 stopni w odstępach 30 stopniowych. Szyny wsunięte są w kieszenie utworzone przez dodatkowe warstwy materiału przyłączonego za pomocą micro-velcro, takie rozwiązanie pozwala na szybką i łatwą regulację na długość. Nakładki tworzące kieszenie mają anatomiczny kształt oraz są dodatkowo perforowane by zwiększyć odpływ nadmiaru ciepła z ciała. Rękawy ramienny i przedramienny z zewnątrz wykończone są welurem, natomiast wewnętrzna część, która ma bezpośredni kontakt z ciałem posiada wykończenie frotte. Wewnętrzne plastikowe sztywniki zwiększają sztywność i zwiększają stopień stabilizacji ortezy natomiast taśmy dociągowe mają szersze końce zapobiegające wysuwaniu się taśm ze sprzączek.

#### Zastosowanie:

złamania przez-stawowe kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego, złamania jednej trzeciej dalszej kości ramiennej, złamania nadkłykciowe, złamania kości łokciowej, promieniowej, złamania patologiczne (Osteolysis, Metastasis), po zabiegach chirurgicznych w obrębie więzadeł stawu łokciowego. W neuropatii (czasowe porażenie) na skutek urazu, w przypadku porażenia nerwu promieniowego zaleca się stosowanie wersji z ujęciem kciuka.

#### Działanie:

wysoki stopień dopasowania i stabilizacji oraz możliwość kontroli zakresu i ustawienia kończyny górnej w stawie łokciowym.

#### Zakładanie:

JEŻELI SZYNY BYŁY WYCIĄGANE W CELU USTAWIENIA REGULACJI, MUSZĄ BYĆ WŁOŻONE POMIĘDZY WKŁADKI PLASTIKOWE A MATERIAŁ. Produkt musi być zakładany i dopasowywany przez lekarza, technika ortopedę lub fizjoterapeutę. Najpierw należy dopasować wkładki i szyny do budowy pacjenta, ustawić żądany kąt w stawie łokciowym, następnie założyć ujęcia ramienne i przedramienne, w dalszej kolejności wsunąć szyny w odpowiednie miejsca. Oś szyn powinna pokrywać się z osią stawu, następnie należy dociągnąć taśmy stabilizujące. Zegar oferuje możliwość ustawienia kąтового poprzez dołączony klucz imbusowy.

**Pakowanie:**D-prawy / I-lewy.

**Długość:**długość stabilizatora może być regulowana od 42 do 44cm.

**Kolor:**szary.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód w połowie ramienia	Obwód w połowie	Obwód nadgarstka w modelach
---------	--------------------------	-----------------	-----------------------------

---

	(cm)	przedramienia (cm)	94301/94302
S	26-32	20-25	
M	32-37	25-30	18-22
L	37-43	30-35	>22

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S

**TYP:** lewy , prawy