

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-opl490-opl491-p-2553.html>



## Orteza stawu skokowego OPL490 - OPL491

Numer katalogowy	<b>OPL490 - OPL491</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego wykonano z oddychającego półsztywnego materiału tak, by mógł być zastosowany w różnych jednostkach chorobowych jako: zwykły ściągacz, stabilizator pronująco/supinujący staw skokowy, z taśmą dociągową.

#### Zastosowanie:

skręcenia, wiotkość więzadłowa, chroniczne niestabilności, leczenie pooperacyjne i pourazowe, zapobieganie urazom podczas chodzenia.

#### Zakładanie:

1. Rozluźnić taśmy usytuowane w przedniej części ortezy, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Wsunąć stopę do stabilizatora, upewniając się przy tym, że pięta została prawidłowo umieszczona w przeznaczonym na nią tylnym otworze.
3. Naciągnąć i przymocować taśmy w taki sposób, aby zapewnić mocne i wygodne dopasowanie.

#### Zakładanie sztywnej dzianinowej taśmy korekcyjnej:

1. Przymocować końcówkę taśmy (wyposażoną w metalową sprzączkę) w części podeszwowej ortezy na wysokości śródstopia. Przeciągnąć ją w górę wokół podbicia ku stronie przyśrodkowej lub bocznej (w celu ograniczenia ruchu pronacji lub supinacji).
2. Następnie, po jej owinięciu od tyłu wokół kończyny powyżej stawu skokowego, przymocować ją na ortezie.
3. Aby wyregulować naciągnięcie taśmy należy odpiąć jej przecigniętą przez sprzączkę końcówkę wyposażoną w zapięcie micro-velcro, a następnie odpowiednio ją naciągnąć i ponownie przymocować.
4. W celu skrócenia długości taśmy dociągowej, uwalniamy końcówkę z zapięciem micro-velcro/rzepem i przycinamy materiał do wymaganej długości.
5. Należy upewnić się, że taśma została przecignięta w kierunku odpowiadającym leczonej niestabilności stawu skokowego: bocznej lub przyśrodkowej.

#### Dobór:

produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

**Kolor:** OPL490 czarny // OPL491 beżowy

#### Tabela - rozmiary:

---

ROZMIAR  
Obwód podudzia 2 cm nad  
kostkami

1  
23-26

2  
26-29

3  
29-32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3

**Kolor:** beżowy , czarny