

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-skokowego-stabilizujaca-pt0329-p-2658.html>



## Orteza stawu skokowego - stabilizująca PT0329

Numer katalogowy	<b>PT0329</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zwichnięcia i skręcenia stawu skokowego
- doleczenie po unieruchomieniu gipsowym (złamania kości skokowej, piętowej, artrodezy i rekonstrukcje aparatu więzadłowego stawu skokowego)
- zespoły bólowe stawu skokowego i aparatu więzadłowego
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego

Bardzo dobra stabilizacja poprzez zastosowanie usztywnień bocznych, sznurowadeł przednich i taśm, które w sposób doskonały stabilizują cały staw skokowy i stopę.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kostką [cm]	19 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

Ortezę wciągając na wysokość stawu skokowego, umieszczając piętę w otworze, następnie zawiązać sznurowadło tak, by

---

dokładnie dopasować wzmocnienia boczne okołokostkowe. Następnie należy zapiąć taśmę wzmacniającą, zaczynając od tyłu, nad piętą, krzyżując ją na przegubie, a następnie jeszcze raz pod stopą i zapiąć rzepy ponad wzmocnieniami na ortezie.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL