

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-sznurówka-tulowia-sztywna-wysoka-ze-stalkami-lub-fiszbinami-tlso-b-p-2427.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami TLSO-B

Numer katalogowy	TLSO-B
Producent	Orliman

Opis produktu

Gorset wyposażony w termoplastyczny sztywnik brzuszny, który w połączeniu ze sztywnikiem piersiowo-lędźwiowym dają bardzo silne podparcie i unieruchamiają kręgosłup piersiowo-lędźwiowy. Płyty termoplastyczne umiejscowione są w mocnym, nieelastycznym materiale, o perforowanej oddychającej strukturze. Część przednia i tylna połączone są taśmami dociągowymi. Gorset jest całkowicie otwarty z jednej strony i zapinany na zamek błyskawiczny.

Zastosowanie:

Osteoporosis, Spondyloarthrosis, Spondylolysis (kręgoszczelina), choroby krążka międzykręgowego, zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego, pourazowo, złamania kompresyjne, stabilizacja zespołów wykonywanych operacyjnie, przewlekłe choroby mięśniowe, złamania (jako skutek Metastasis), korekcja hyperkyfosis odcinka piersiowego kręgosłupa, profilaktyka stenozy kanału kręgowego u pacjentów przewlekłe leżących.

TLSOA-B jest przeznaczony dla pacjentów z rozluźnieniem powłok brzusznych.

Działanie:

przednio-tylne podparcie tułowia powoduje zmniejszenie siły nacisku wywieranej na krążki międzykręgowy oraz odciążenie więzadeł stabilizowanej części kręgosłupa, włączając także korekcję hyperlordozy lędźwiowej. Star Brace dzięki termoplastycznym sztywnikom oddziałuje na ciało pacjenta jak sztywny gorset korekcyjny, eliminując jednakże dyskomfort powstający w przypadku noszenia typowego gorsetu korekcyjnego. Dobór rozmiaru nie wymaga pobierania typowej miary na gorset, ponieważ jest on określany na podstawie obwodu bioder pacjenta. Taśmy barkowe ściągają i stabilizują barki powodując odciążenie okolicy międzyłopatkowej. Końce taśm zaopatrzone są w odczepiane taśmy velcro, takie rozwiązanie pozwala na dopasowanie długości taśm indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Dopasowanie:

płyty termoplastyczne mogą być dopasowane indywidualnie do budowy i potrzeb pacjenta. Powinien tego dokonać technik ortopeda, przy użyciu specjalnej nagrzewnicy lub poprzez rozgrzanie w specjalnej wannie termicznej.

Dostępne (inne) modele:

TLSO-B Gorset lędźwiowo-krzyżowy.

TLSOA-B Gorset lędźwiowo-krzyżowy dla osób z rozluźnieniem powłok brzusznych.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód bioder	80-90	90-100	100-110	110-120

w najszerszym
miejscu (cm)

TYP	Wersja	Wysokość z tyłu (cm)	Wysokość z przodu (cm)
TLSO-B	unisex	51	2(S)= 26 3(M)= 27 4(L)= 27 5(XL)= 28,5
TLSOA-B	unisex	51	2(S)= 28 3(M)= 29,5 4(L)= 30,5 5(XL)= 32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Model: TLSO-B , TLSOA-B