

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-uda-stabilizujaca-pt0316-p-2655.html>



Orteza uda - stabilizująca PT0316

Numer katalogowy	PT0316
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w celu ochrony przed urazami
- w celu zapobiegania obrzękom, zmniejszania opuchlizny
- po urazach mięśni uda
- przy przemęczeniu i nadwyżeniu mięśni uda
- w zespołach bólowych

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód na środku uda [cm]	38 - 47	48 - 54	55 - 63	64 - 69	70 - 77

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Naciągnąć ortezę na nogę na wysokość uda, a następnie zapiąć kolejno wszystkie taśmy, regulując indywidualnie ucisk na obwodzie uda. Ortezę można stosować również bez taśm dociągających (w takim przypadku odpiąć cały element regulacji na rzepy).

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem rozdzielić ortezę i pasy zapinające, a następnie - w celu uniknięcia pohaczenia rzepem ostrym - zapiąć pasy na rzep.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.