

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-z-paskami-sciagajacymi-i-pelota-ledzwiowa-lumbamed-stabil-p-7826.html>



Orteza z paskami ściągającymi i pelotą lędźwiową Lumbamed® stabil

Numer katalogowy **9736**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z paskami ściągającymi i pelotą lędźwiową

- Wybór dwóch długości części pleców
- Regulowane paski ściągające
- Łatwe użycie dzięki zintegrowanym szlufkom na dłonie

Orteza stabilizująca okolicę lędźwiową z paskami ściągającymi i pelotą lędźwiową

Lumbamed stabil to orteza lędźwiowa do mobilizacji. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Zmniejszenie lordozy za pomocą 3-punktowego systemu pasków
- Wsparcie kompresji brzucha i podniesienie podbrzusza

Sposób działania

Materiał kompresyjny z 4 zintegrowanymi pręcikami stabilizacyjnymi oraz możliwość dozowania ucisku dzięki pasom ściągającym prowadzą poprzez ściśnięcie jamy brzusznej i wspieranie mięśni tułowia do odciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i tym samym do zmniejszenia bólu. Pelota lędźwiowa wzmacnia ten efekt dzięki dodatkowemu uciskowi powierzchniowemu, jaki wywiera po obydwu stronach kręgosłupa, oraz dzięki efektowi masażu na mięśniach pleców.

Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę przymocować pelotę na taśmie flauszowej od wewnętrznej strony tak, jak pokazał Państwu technik ortopedyczny. Szersza strona powinna wskazywać zawsze do góry. Proszę przymocować najpierw końcówki obydwu pasów ściągających na zewnętrznej krawędzi poszczególnych części zapięcia.

Proszę chwycić lewą ręką szlufkę dolnej części zapięcia (brak logo firmy medi).
Proszę owinąć bandaż wokół ciała i chwycić prawą ręką szlufkę górnej części zapięcia.
Proszę ustawić teraz ortezę na plecach w ten sposób, aby kręgosłup leżał pośrodku między pręcikami stabilizującymi lub tak, aby wolna przestrzeń po środku peloty plecowej znajdowała się nad kręgosłupem.
Proszę przytrzymać mocno dolną część zapięcia przed brzuchem, przeciągnąć nad nią część górną zapięcia i przymocować ją tymczasowo na waskiej taśmie haczykowej.
Po wyjęciu lewej ręki ze szlufki mogą. Państwo przy jej pomocy przymocować górną część zapięcia płasko na części dolnej.
Na koniec proszę naprężyć pasy ściągające z siłą, jaką uznacie Państwo za właściwą, i przymocować przy tym najpierw pas ściągający lewej strony.

Wskazówki dotyczące noszenia

Tylko dzięki konsekwentnemu noszeniu gorsetu Lumbamed stabil przyczynia się. Pan/Pani do osiągnięcia pozytywnego rezultatu w terapii. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, najpóźniej po 8 godzinach noszenia proszę zdjąć gorset na około 2 godziny.

Skład produktu: Poliester, Poliamid, Elastodiene

Instrukcja prania

Paski z rzepami należy przed praniem zapiąć. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczonego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Przewlekłe stany bólowe w okolicy lędźwiowo-krzyżowej
- Lumboischialgia - ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (z przyczyn związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi)
- Spondyloza bez kręgozmyku
- Nieznaczna spondyloza / kręgozmyk ku przodowi
- Protruzja krążka międzykręgowego
- Osteochondroza, spondyloartroza
- Podrażnienia stawu biodrowo-krzyżowego

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nieznane.

Rozmiar	obwód w pasie	70 - 82	82 - 95	95 - 108	108 - 121	121 - 134	134 - 149
(cm)							
rozmiar		I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu		K.240.5□1	K.240.5□2	K.240.5□3	K.240.5□4	K.240.5□5	K.240.5□6

□ = 0 = bez wkładki 26 cm 1 = bez wkładki 32 cm 2 = z wkładką 26 cm 3 = z wkładką 32 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V

Kolor: czarny

Wysokość: 26 cm , 32 cm

Wariant: bez peloty , z pelotą