

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-zapobiegajaca-opadaniu-stopy-dla-dzieci-walkon-reaction-junior-p-7395.html>



Orteza zapobiegająca opadaniu stopy dla dzieci - WalkOn Reaction junior

Numer katalogowy	9556
Producent	Ottobock

Opis produktu

Niesamowita dynamika!

Orteza WalkOn Reaction junior to nowość w rodzinie WalkOn. Przeznaczona specjalnie dla dzieci z łagodnymi objawami neurologicznymi kończyn dolnych. Zapewnia dzieciom większe wsparcie i bezpieczeństwo niż tradycyjne zaopatrzenie tego typu. Orteza zmniejsza ryzyko potknięcia i upadku, poprawiają się też wzorce ruchowe.

Dynamiczna właściwość ortezy, poprawia u dziecka zgięcie grzbietowe i wykorzystuje siły oddziaływania podłoża, w celu ustabilizowania stawu kolanowego oraz skokowego. Ortezę zakłada się od przodu na podudzie, co pomaga dziecku osiągnąć bardziej stabilny i fizjologiczny chód.

- Poprawa zgięcia grzbietowego i ruchu przetaczania, dzięki innowacyjnemu elementowi sprężynującemu
- Konstrukcja ortezy pozwala na przystosowanie jej do różnych rozmiarów i warunków anatomicznych dzieci
- Liczne zalety ortezy WalkOn Reaction junior, a także wysoki komfort użytkowania, zyskały sobie uznanie dzieci

Rodzina produktów WalkOn

Oferta obejmuje pięć rodzajów ortez WalkOn. Jedną z nich jest WalkOn Reaction junior, odpowiednia dla dzieci o rozmiarze buta od 24. Pozostałe modele z naszej serii WalkOn dostępne są od rozmiaru buta 36.

Korzyści w skrócie:

Bardziej naturalny chód

The WalkOn Reaction junior umożliwia niemal fizjologiczny chód. Specjalna konstrukcja ortezy wspiera wyprost i zgięcie kolana podczas chodzenia. Wzorzec chodu dziecka staje się płynniejszy. Dotyczy to również dzieci z wyższym poziomem aktywności, które wymagają większego wsparcia dla wyprostowania kolana.

Mniej ruchów kompensacyjnych

Ruchy kompensacyjne często powodują nienaturalny chód. Orteza WalkOn Reaction junior zmniejsza to zjawisko dzięki wysokiemu zwrotowi energii. Energia zmagazynowana przez ortezę podczas uderzenia piętą, zostaje uwolniona podczas ruchu

przetaczania stopy. Pomaga to dziecku chodzić bardziej symetrycznie. Specjalne osiowanie ortezy, zapewnia bardziej naturalną pozycję również podczas stania.

Zwiększone bezpieczeństwo

Orteza WalkOn Reaction junior wspomaga i podnosi stopę dziecka podczas chodu w fazie przenoszenia, co zwiększa bezpieczeństwo. Mniejsze jest ryzyko zahaczenia czubkiem stopy na przykład o krawędź dywanu lub nierówną powierzchnię podłoża.

Przystosowana do obuwia

Ortezę można nosić ze standardowymi butami, nadaje się też do butów wzmacnianych. Należy jedynie pamiętać, że but musi mieć wzmacnianą piętę. Aby założyć ortezę, należy najpierw włożyć WalkOn Reaction junior do buta, a następnie dziecko może włożyć stopę w but.

Lekka i dyskretna

Orteza WalkOn Reaction junior jest lekka, smukła i dyskretnie układa się pod odzieżą. Wyściółka goleniowa zapewnia jeszcze większą wygodę. Wykonana jest z materiału regulującego temperaturę przy skórze, który zmniejsza gromadzenie się ciepła i pocenie się.

Solidna i trwała

Orteza WalkOn Reaction junior jest wyjątkowo solidna. Udowodniono jej trwałość w licznych badaniach i długich testach funkcjonalnych.

Nadzieja dla dzieci.

Ottobock współpracuje z Fundacją Piotra Maffay, pomagając dzieciom niepełnosprawnym, które dorastają w trudnych warunkach. Mała ikonka smoka Tabaluga, jest symbolem tej współpracy. (©(2016) Tabaluga Enterprises GmbH)

Wskazania:

- Mózgowe porażenie dziecięce
- Opadanie stopy bez spastyczności
- Opadanie stopy z łagodną lub umiarkowaną spastycznością
- Hemipareza i dipareza