

Link do produktu: <https://akmed.pl/pachwinowy-pas-jednostronny-brzuszy-PT0107-p-2701.html>



Pachwinowy pas jednostronny brzuszny PT0107

Numer katalogowy	PT0107
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w przypadku przepuklin pachwinowych prawostronnych lub lewostronnych
- jako zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- doskonale podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u pacjentów, których nie można operować
- pas przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód bioder [cm]	85 - 95	96 - 105	106 - 115	116 - 125	126 - 135	136 - 145

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Zapiąć taśmę główną na wysokość bioder, a następnie zapiąć taśmę kroczną – szerszą część taśmy z przodu dociskając odprowadzoną przepuklinę, węższy koniec taśmy zapiąć z tyłu na rzep. Ucisk pasa można regulować taśmą główną i taśmą kroczną.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL