



## Pas barkowy prostujący PT0201

Numer katalogowy	<b>PT0201</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- dla dzieci i młodzieży z wadami postawy np. przy pochylonych plecach i zapadniętej klatce piersiowej
- skutecznie wymusza utrzymanie prawidłowej postawy
- zalecany osobom dorosłym w przypadkach dyskopatii kręgosłupa w odcinku piersiowym
- łagodzi zespoły bólowe, wspomaga mięśnie grzbietowe kręgosłupa

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód klatki piersiowej [cm]		50 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 100

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Założyć szelki na ramiona, skrzyżować taśmy na plecach i zapiąć z przodu na rzep, regulując ucisk.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

---

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.
- Pas stosowany bezpośrednio na skórę może wywołać reakcje alergiczne.
- Zaleca się noszenie pasa na białej bieliźnie.
- Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni kręgosłupa.

**Dostępne kolory:**

biały PT 0201

cielisty PT 0201C

granatowy PT 0201G

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** biały , Cielisty , granatowy