

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznystabilizujacy-pt0122-p-2596.html>



## Pas brzuszny stabilizujący PT0122

Numer katalogowy	<b>PT0122</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- ochrona organów wewnętrznych (zwłaszcza nerek) szczególnie podczas uprawiania sportów (jazdy na motorze, rowerze, nartach) oraz podczas pracy
- doskonałe odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz pasa

Pas przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, zwłaszcza prowadzących aktywny tryb życia.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas założyć na odcinek lędźwiowo - krzyżowy kręgosłupa, a następnie zapiąć z przodu na rzep.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Przed praniem zapiąć rzep w celu uniknięcia pohaczenia.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL