

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-stomijny-16-pt0106-p-2708.html>



## Pas brzuszny stomijny "16" PT0106

Numer katalogowy	<b>PT0106</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego
- pas można stosować w przypadku różnego umiejscowienia przetoki

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak by otwór na worek stomijny przypadła w miejscu, gdzie znajduje się przetoka jelita. Pas zapiąć na rzep dopasowując indywidualnie. Po umocowaniu worka stomijnego zabezpieczyć go siateczką osłaniającą.

**Uwaga! Opakowanie nie zawiera worków stomijnych.**

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Pas zapinany jest na rzep.**

Szerokość pasa 16 cm.

**Dostępne kolory:**

biały PT 0106

cielisty PT 0106B

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

**Kolor:** biały , Cielisty