

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-torako-dla-kobiet-na-klatke-piersiowa-z-jednym-otworem-pt0114a-p-2714.html>



Pas TORAKO dla kobiet - na klatkę piersiową z jednym otworem PT0114A

Numer katalogowy	PT0114A
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach kardiochirurgicznych
- zmniejsza dolegliwości bólowe i stabilizuje zewnątrznie klatkę piersiową
- zmniejsza ryzyko destabilizacji i rozejścia się rany pooperacyjnej
- poprawia warunki gojenia się rany pooperacyjnej
- daje poczucie pewności i komfortu
- przyspiesza powrót do pełnej sprawności po operacji kardiochirurgicznej
- po złamaniach żeber zmniejsza dolegliwości bólowe i stabilizuje klatkę piersiową

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód klatki piersiowej [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu

Sposób zakładania:

Odpiąć rzep i szelki. Pas założyć na klatkę piersiową, zapiąć rzep z przodu i wyregulować długość szelek z zapięciami na rzepy.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL