

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-wzmacniajaco-ochronny-pt0208-p-2690.html>



Pas wzmacniająco - ochronny PT0208

Numer katalogowy	PT0208
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- stabilizuje odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa przy wykonywaniu pracy fizycznej
- w zespołach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zniekształcającymi
- zapobiega wypadaniu tarcz międzykręgowych
- we wzmożonym napięciu mięśniowym przy dyskopatii lędźwiowej
- wzmacnia mięśnie brzucha w czasie wysiłku fizycznego

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]	60 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 115	> 115

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

W pierwszej kolejności należy założyć szelki. Część pasa ze wzmocnieniami należy oprzeć na odcinku lędźwiowo - krzyżowym i zapiąć rzepy w przedniej części pasa. Następnie należy jednocześnie z obu stron dociągnąć rzepy znajdujące się na taśmie. Dociągnąć taśmy tak, aby poczuć stabilizację dolnego odcinka kręgosłupa. Prawidłowo założony pas musi znajdować się na odcinku lędźwiowo - krzyżowym kręgosłupa.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Dostępne kolory:

cielisty PT 0208C

czarny PT 0208

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: Cielisty , czarny