

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-z-fiszbinami-siatkowy-pt0216-p-2691.html>



## Pas z fiszbinami - siatkowy PT0216

Numer katalogowy	<b>PT0216</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (zmiany dyskopatyczne)
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie urazów
- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii lędźwiowej
- wzmocnienie mięśni
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza w pozycjach wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	> 130

#### Sposób zakładania:

- Odpiąć rzepy.
- Pas założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby fiszbiny były ułożone rozszerzająco do dołu.
- Pas zapiąć z przodu na rzepy, a następnie zapiąć taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.

#### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

#### Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

---

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

**Wyrób jest zapinany na rzepy.**

Wysokość wyrobu 24,5 cm.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL