

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowki-kompresyjne-dla-mezczyzn-mediven-for-men-p-7965.html>



Podkolanówki kompresyjne dla mężczyzn mediven® for men

Numer katalogowy **9877**

Producent **Medi**

Opis produktu

Kompresja na męskie nogi

- Część na stopę w kształcie anatomicznym, z rozróżnieniem stopy prawej i lewej
- Modna prążkowana faktura
- Zawiera lanolinę dla efektywnej pielęgnacji skóry

Atrakcyjna podkolanówka mediven for men z żeberkowaną fakturą

mediven for men to podkolanówka anatomicznie dopasowana do pięt i palców. Posiada rozróżnienie na stopę prawą i lewą. Specjalna struktura materiału przeznaczona typowo dla mężczyzn. Produkt bardzo miękki, gładki i wysoce elastyczny.

Zalety produktu

- Atrakcyjna prążkowa struktura materiału
- Wyraźne oznaczenie stopy prawej i lewej
- Dostępne różne warianty (patrz „Rodzaje produktu” z lewej strony)
- W kolorach czarnym, brązowym, granatowym i szarym
- Clima-Comfort zapewnia dużą przepuszczalność powietrza i niezawodną regulację temperatury.
- Miękka i gładka struktura materiału

Długości

- Podkolanówka

Skład produktu

CCL 1: 23% elastanu, 77% poliamidu

CCL 2: 29% elastanu, 71% poliamidu

Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypluć!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

- Cykl skrócony.
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor.
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu.
- Nie prasować.
- Nie prać chemicznie.

Wskazania

- Żylakowatość pierwotna lub wtórna
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C3 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Odmiany: AD normalne , AD skrócone , Podkolanówka

Klasa Kompresji: CCL 1 , CCL 2

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: brązowy , czarny , granatowy , szary