

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-medic-line-viva-15-mm-md363-p-8043.html>

## Podpiętki Medic Line VIVA 15 mm MD363



Numer katalogowy **13396**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- kliny dla osób ze skrótem kończyny
- wydłużony korkowy profil pozwala podeprzeć piętę krótszej nogi i wyrównać asymetrię długości nóg
- zalecane do stosowania w obuwiu z ustabilizowaną piętą
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj	Podpiętki/zapiętki
Przeznaczenie	Nierówności kończyn dolnych
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie
Wykonanie	Naturalna skóra, sztywny profil
Rozmiar	24/29, 30/34, 35/37, 38/40, 41/43, 44/46
Wysokość	5 mm MD468 10 mm MD361 15 mm MD363 20 mm MD364 25 mm MD365

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca

---

się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.  
Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 24/29 , 30/34 , 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46