

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-medic-line-viva-20-mm-md364-p-8044.html>

Podpiętki Medic Line VIVA 20 mm MD364



Numer katalogowy **13397**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- kliny dla osób ze skrótem kończyny
- wydłużony korkowy profil pozwala podeprzeć piętę krótszej nogi i wyrównać asymetrię długości nóg
- zalecane do stosowania w obuwiu z ustabilizowaną piętą
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Wykonanie
Rozmiar
Wysokość

Podpiętki/zapiętki
Nierówności kończyn dolnych
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie
Naturalna skóra, sztywny profil
24/29, 30/34, 35/37, 38/40, 41/43, 44/46
5 mm MD468
10 mm MD361
15 mm MD363
20 mm MD364
25 mm MD365

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca

się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.
Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 24/29 , 30/34 , 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46