

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-pozycjonujaca-bark-medi-slk-90-p-7836.html>



Poduszka pozycjonująca bark medi SLK 90

Numer katalogowy **9746**

Producent **Medi**

Opis produktu

Poduszka pozycjonująca bark

- Anatomicznie ukształtowana poduszka
- Ćwiczenie przedramienia przez podpórkę dłoni

Poduszka pozycjonująca do unieruchomienia barku

medi SLK 90 jest poduszką stosowaną przy zwichnięciu barku. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Pozwala na położenie barku pod kątem 90° w płaszczyźnie czołowej, pozostawiając torebkę tylną w optymalnej pozycji

Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę rozpiąć czerwone zapięcie samozatraskowe pasa biodrowego znajdujące się na poduszce. Następnie proszę założyć poduszkę stroną taliowaną powyżej kości biodrowej po stronie chorego ramienia.

Proszę przeprowadzić pas wokół talii i zapiąć go. Następnie proszę nastawić długość pasa, aby osiągnąć optymalne ułożenie. Proszę rozpiąć czarne zapięcie samozatraskowe z przodu na poduszce i spuścić pas do tyłu.

Następnie proszę rozpiąć pasy na torebce i włożyć do niej ramię w ten sposób, aby łokieć znajdował się całkowicie w rogu torebki.

Proszę położyć dłoń na piłce. Następnie proszę zapiąć torebkę przy pomocy pasków rzepowych.

Pas barkowy należy założyć od tyłu na zdrowy bark. Następnie proszę wsunąć się przez powstałą pętlę jak przy ubieraniu kurtki.

Proszę zapiąć pas barkowy znajdujący się z przodu na poduszce. Proszę nastawić długość pasa barkowego.

Należy uważać na to, aby pasy były napięte, ale nie wżynały się w ciało w okolicy pach. Jeśli pas jest za długi, można zdjąć zapięcie rzepowe Y i skrócić nożyczkami pas na pożądaną długość, a następnie znowu przymocować zapięcie Y.

Skład produktu: Pianka PU, poliamid

Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie. Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Pooperacyjne unieruchomienie stawu po tylnej stabilizacji barku
- Pooperacyjne unieruchomienie stawu po wielokierunkowej niestabilności
- Leczenie zachowawcze po urazowych zwichnięciach tylnych stawu barkowego z uszkodzeniem obrąbka typu Bankarta
- Dwukierunkowe unieruchomienie w przypadku niestabilności przedniej i tylnej stawu barkowego
- Unieruchomienie po uwolnieniu przedniej torebki
- Leczenie zachowawcze po nieprzesuniętych złamaniach guzka większego kości ramiennej
- Transfer mięśnia najszerzego grzbietu

Przeciwwskazania

- Tylne zablokowane zwichnięcie stawu barkowego
- Niestabilność stawu barkowego w przypadku choroby Parkinsona

Rozmiar

długość od łokcia do kostek	do 34	35 - 39	powyżej 39
dłoni (cm)			
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	R.133.◇02	R.133.◇03	R.133.◇04

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa, 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: szary

TYP: lewy , prawy