

Link do produktu: <https://akmed.pl/polwkladka-do-korekcji-ustawienia-palcow-mlotkowatych-medic-line-hammer-toe-2-ms494-p-8086.html>



## Półwkładka do korekcji ustawienia palców młotkowatych Medic Line HAMMER TOE 2 MS494

Numer katalogowy **13439**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- półwkładka przeznaczona do korekcji ustawienia palców młotkowatych
- miękkie, regulowane pierścienie pomagają ustawić palce w naturalnej pozycji, korekcyjne działanie można regulować poprzez odpowiednie naciągnięcie taśmy
- orteza wykonana z miękkiej pianki, komfortowa w użytkowaniu
- pierścienie chronią palce przed otarciami i bolesnymi nagniotkami

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Półwkładki  
Palce młotkowe/szponiaste  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie  
Uniwersalny

Rozmiar

### Pranie

Mycie ręczne

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.