

Link do produktu: <https://akmed.pl/polwkladki-medic-line-elba-mp334-p-8055.html>

## Półwkładki Medic Line ELBA MP334



Numer katalogowy **13408**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- półwkładki przeznaczone dla osób z płaskostopiem poprzecznym
- elastyczna pelota w kształcie kropli zapewnia poprawny rozkład nacisków w śródstopiu
- zalecane do obuwia pełnego
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Półwkładki  
Płaskostopie poprzeczne  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Sandały, Czółenka  
Wyściółka, pelota, pianka lateksowa  
35/36, 37/38, 39/40, 41/42

Wykonanie  
Rozmiar

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42