

Link do produktu: <https://akmed.pl/polwkladki-medic-line-salma-gel-lux-ms309-p-8062.html>

Półwkładki Medic Line SALMA GEL LUX MS309



Numer katalogowy	13415
Producent	Mazbit

Opis produktu

- żelowe półwkładki dla osób odczuwających bóle i przemęczenie okolicy śródstopia
- samoprzylepne, transparentne półwkładki amortyzują wstrząsy oraz łagodzą nadmierne przeciążenia śródstopia
- zapobiegają przesuwaniu się stopy w bucie
- zalecane zwłaszcza do obuwia na wysokim obcasie, również otwartego

Rodzaj	Półwkładki, Wyroby żelowe/silikonowe
Przeznaczenie	Pozostałe dolegliwości
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny, Sandały, Czółenka, Japonki
Wykonanie	Miękki, przezroczysty żel
Rozmiar	Uniwersalny

Pranie

Mycie ręczne
Talk

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.