



Poporodowy pas brzuszny PT 0104

Numer katalogowy	PT 0104
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po porodach fizjologicznych – wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne
- po porodach operacyjnych (cesarskie cięcie) – zabezpiecza przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa, łagodzi bóle rany pooperacyjnej
- ułatwia wczesne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających mięśnie brzucha

Systematyczne noszenie pasa i wykonywanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń gimnastycznych przyspiesza powrót do sylwetki sprzed ciąży.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód brzucha [cm]		80 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

Pas jest wciągany przez nogi.

Szerokość pasa 24 cm.

Dostępne kolory:

biały PT 0104

cielisty PT 0104C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL