



## Poporodowy pas brzuszny PT 0104

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>PT 0104</b>     |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po porodach fizjologicznych – wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne
- po porodach operacyjnych (cesarskie cięcie) – zabezpiecza przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa, łagodzi bóle rany pooperacyjnej
- ułatwia wczesne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających mięśnie brzucha

Systematyczne noszenie pasa i wykonywanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń gimnastycznych przyspiesza powrót do sylwetki sprzed ciąży.

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR            | XS | S       | M        | L         | XL        | XXL       |
|--------------------|----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Obwód brzucha [cm] |    | 80 – 90 | 91 – 100 | 101 – 110 | 111 – 120 | 121 – 140 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

---

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Pas jest wciągany przez nogi.**

Szerokość pasa 24 cm.

**Dostępne kolory:**

biały PT 0104

cielisty PT 0104C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL