

Link do produktu: <https://akmed.pl/prostotrzymacz-ortopedyczny-osemka-pt0228-p-2674.html>



## Prostotrzymacz ortopedyczny "ÓSEMKA" PT0228

Numer katalogowy	<b>PT0228</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- unieruchomienie po urazach obojczyka
- unieruchomienie po zabiegach chirurgicznych
- w zespołach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa
- korekcja wad postawy (okrągłe plecy, klatka lejkowata), wyrabianie nawyku prawidłowej postawy

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M/L	XL/XXL
Obwód klatki piersiowej [cm]		50 – 70	71 – 90	91 – 110

(pod pachami / nad biustem)

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej w linii pod pachami (nad biustem), a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

- Prostotrzymacz nałożyć na ramiona. Po raz pierwszy wyrób można założyć z udziałem drugiej osoby, która wyreguluje siłę odchylenia barków za pomocą regulacji na rzep lub wyregulować samodzielnie.
- Aby zdjąć wyrób można odpiąć rzep z jednej strony. Przed ponownym założeniem zapiąć rzepy według wyznaczonych uprzednio odległości.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W okresie noszenia wyrobu zalecane jest również wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.
- Ciągłe stosowanie wyrobu bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** M/L , S , XL/XXL , XS