

Link do produktu: <https://akmed.pl/prostotrzymacz-pani-teresa-pt0206-p-2672.html>



## Prostotrzymacz PANI TERESA® PT0206

Numer katalogowy	<b>PT0206</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- wady postawy, kifoza piersiowa
- symetryczne niedowłady wiotkie mięśni grzbietu
- choroby neurologiczne z częściowym porażeniem mięśni
- ochrona po wyleczonych złamaniach kręgosłupa

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód klatki piersiowej [cm]	50 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 100

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Założyć szelki na ramiona. Skrzyżowane na plecach taśmy i zapiąć z przodu pod biustem na rzep.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

##### Przepis prania:

---

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

### **Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu konsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni kręgosłupa.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL

**Kolor:** Cielisty , czarny