

Link do produktu: <https://akmed.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-ccl-1-delicate-p-4155.html>



## Rajstopy medyczne uciskowe CCL 1 DELICATE

Numer katalogowy	<b>PT0431</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### **PT 0431 Rajstopy medyczne uciskowe CCL 1 DELICATE (15 - 21 mmHg)**

##### **Wskazania / Zastosowanie:**

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastójne na skutek unieruchomienia / zespół zastójny stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

##### **Bezwzględne przeciwwskazania:**

- zaawansowana niedrożność żył obwodowych niewyrównana niewydolność serca septyczne zapalenie żył bolesny siniczny obrzęk kończyny

##### **Względne przeciwwskazania:**

- wyraźna dermataza sącząca duże zaburzenia wrażliwości kończyn zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca) pierwotne, chroniczne zapalenie stawów nietolerancja na materiał, z którego wykonane są produkty

### **INSTRUKCJA UŻYWANIA**

#### **Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiarów obwodów obu nóg, w pozycji stojącej, w miejscach wskazanych w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

#### **Tabela rozmiarów**

---

### **Objaśnienia do tabeli rozmiarów:**

AT rajstopy

AG pończochy

AD podkolanówki

K środkowy punkt krocza

CH obwód bioder

cG obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF obwód mierzony w połowie uda

cD obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC obwód mierzony w łydce – w miejscu największego obwodu

cB obwód mierzony w kostce – w miejscu najmniejszego obwodu

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

dla rajstop i pończoch AG 60 – 70 cm krótkie / AG 71 – 83 cm długie

dla podkolanówek AD 34 – 37 cm krótkie / AD 38 – 44 cm długie

### **Sposób zakładania:**

Medyczne produkty kompresyjne zakłada się inaczej niż zwykłe wyroby pończosnicze. Produkty kompresyjne należy zakładać rano, po nocnym odpoczynku, najlepiej przed wstaniem, w pozycji leżącej lub zaraz po wstaniu.

Należy stosować się do poniższej instrukcji:

- Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, ale zebrać ostrożnie wyrób w dłoniach na całej długości. W przypadku pończoch nie należy chwytać bezpośrednio za szew taśmy samonośnej z silikonem.
- Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
- Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
- Nakładać do kolana, dokładnie rozprowadzając na łydce, zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania, wygładzić wewnętrzną stroną dłoni.
- Wyrób nałożyć do pełnej długości.
- W przypadku rajstop nałożyć tak, jak opisano powyżej – najpierw na jedną nogę do kolana, potem na drugą nogę, a następnie do pełnej długości rajstop.

### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### **Wskazówki dotyczące pielęgnacji:**

- Produkt kompresyjny prać codziennie, po noszeniu.
- Prać najlepiej oddzielnie lub przynajmniej z tkaninami o podobnych kolorach.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

### **Uwagi:**

- Dobór klasy kompresji, dopasowanie rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.

- 
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
  - W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.
  - Przy zakładaniu i zdejmowaniu wyrobu zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnego produktu np. paznokciem, zegarkiem lub biżuterią. Zaleca się stosowanie gumowych rękawiczek. Również paznokcie u nóg, chropowata lub zrogowaciała skóra np. na piętach, uszkodzone wnętrze obuwia lub wkładki do butów zwiększające tarcie, mogą doprowadzić do powstania przetarć i uszkodzenia wyrobu.
  - Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.
  - Medyczna skuteczność produktów kompresyjnych gwarantowana jest przy prawidłowej pielęgnacji przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie noszenia zmniejsza się lecznicza skuteczność wyrobów pończosznicznych na skutek zmęczenia i zużycia materiału.

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , L PLUS , M , M Plus , S , S PLUS

**Kolor:** beżowy , ciemny beż , czarny , czarny - NERO , jasny beż

**TYP:** z czubkiem otwartym , z czubkiem zamkniętym

**Długość:** długie , krótkie