

Link do produktu: <https://akmed.pl/sposob-na-odlezyiny-sanity-p-7180.html>



Sposób na odleżyny SANITY

Numer katalogowy	7087
Producent	Sanity

Opis produktu

Sposób na odleżyny Sanity jest specjalistycznym kręgiem ochronnym dla osób spędzających większość czasu w pozycji leżącej np. obłożnie chorych.

Wysokiej klasy krążek wykonany jest z trwałego materiału o maksymalnym obciążeniu na poziomie 150 kg. Łatwy w czyszczeniu, transporcie i przechowywaniu krąg pozwoli w prosty i naturalny sposób zapobiec bolesnym odleżynom

Sposób użycia:

Napompować krąg do odpowiedniej twardości, a następnie zamknąć otwór wlotowy powietrza poprzez dokręcenie zaworu. Elastyczność kręgu można regulować poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza w kręgu. Po użyciu, wypuścić powietrze z kręgu odkręcając zawór. Czyścić ciepłą wodą z mydłem.

Bezpieczeństwo:

Nie zaleca się stosowania kręgu w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Podczas pompowania kręgu należy zachować ostrożność ponieważ wewnątrz zaworu znajduje się ruchoma uszczelka gumowa. Brak uszczelki spowoduje nieszczelność kręgu.