

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizacja-az-do-koncowek-palcow-medi-cts-p-7856.html>



Stabilizacja aż do końcówek palców medi CTS

Numer katalogowy **9766**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizacja aż do końcówek palców

- Swoboda ruchów kciuka
- Unieruchomienie nadgarstka i palców
- Mała waga

Orteza nadgarstka z szyną na palce

medi CTS to opaska usztywniająca nadgarstek.

Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne nadgarstek i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Zmniejszenie obrzęku, stanu zapalnego i bólu poprzez unieruchomienie nadgarstka i palców
- Zmniejszenie bólu związanego z ruchem poprzez stabilizację nadgarstka i palców

Sposób działania

Wearing the medi CTS consistently will support the therapy.

Instrukcja dotycząca zakładania

Szyna usztywniająca ma z góry przystosowany do budowy anatomicznej kształt. W razie potrzeby można ją dopasować do kształtu ręki. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie powstały puste przestrzenie, a palce ułożone były na podpórce w stanie rozluźnionym i w neutralnej pozycji.

Boczne prowadnice znajdujące się na przedramieniu, nadgarstku i na końcach palców zagiąć do góry.

Zapiąć wszystkie cztery paski.

Wskazówki dotyczące noszenia

Tylko konsekwentne noszenie opaski medi CTS może przyczynić się do udanego przebiegu leczenia.

Skład produktu: Aluminium, Poliamid

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze oraz pooperacyjne leczenie poszpitalne kanału nadgarstka
- Unieruchomienie palców i stawu promieniowo-nadgarstkowego po urazach
- Pooperacyjne leczenie poszpitalne
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Artroza stawu promieniowo-nadgarstkowego
- Pourazowe leczenie poszpitalne skręceń stawu promieniowo-nadgarstkowego, śródreźca i palców

Przeciwwskazania

- Niestabilne złamania w okolicy dłoni.

Rozmiar

długość dłoni (cm)	do 15	15 - 17	17 - 19	19 - 22
rozmiar	0	I	II	III
numer artykułu	R.110.000	R.110.001	R.110.002	R.110.003

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , I , II , III

Kolor: szary