

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-barku-medi-shoulder-fix-p-7839.html>



## Stabilizator barku medi Shoulder fix

Numer katalogowy **9749**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator do unieruchomienia barku

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wczesne ruchy funkcjonalne dzięki inteligentnej konstrukcji

### Wsparcie rotacji do wewnątrz - odwiedzenie 0°

medi Arm fix to orteza stabilizująca bark. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Prawie całkowite unieruchomienie stawu barkowego i łokciowego
- Korekcja nieprawidłowego ustawienia z centrowaniem głowy kości ramiennej w panewce stawu barkowego
- Łagodzenie bólu w leczeniu zachowawczym i po zabiegach chirurgicznych

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę założyć szeroki pas poniżej klatki piersiowej i zapiąć go.

Proszę unieruchomić ramię po stronie barku, który doznał obrażeń, paskiem na górnej części ramienia. Proszę umocować kieszeń na przedramię na pasie brzuszny. Następnie otworzyć kieszeń i włożyć w nią ramię, które doznało obrażeń. Na koniec proszę zapiąć kieszeń. Proszę przełożyć dłoń od strony barku, który doznał obrażeń, przez mankiet i przypiąć go na pasie brzuszny.

Proszę przełożyć wąski pasek przez zdrowy bark i połączyć go z kieszenią na przedramię. Następnie proszę tak uregulować taśmę paska, aż nastąpi odciążenie ramienia, które doznało obrażeń.

**Skład produktu:** Poliamid

---

## Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Terapia proksymalnych złamań głowy kości ramiennej
- Terapia złamań łopatki
- Terapia po zwknięciu stawu barkowoobojczykowego
- Terapia bolesnych zmian zwyrodnieniowych stawu barkowego
- Terapia w przypadku zespołu bolesnego barku
- Terapia w przypadku zwyrodnieniowych zmian stawu barkowo- obojczykowego
- Terapia po zastosowaniu protez stawu barkowego
- Terapia po zwknięciu barku
- Terapia w przypadku przewlekłego podwichnięcia barku
- Terapia złamań dystalnej części kości ramiennej

## Przeciwwskazania

- Leczenie zachowawcze i pooperacyjne tylnego zwknięcia stawu barkowego

## Rozmiar

	medi Arm fix mini	medi Shoulder fix	medi Arm fix maxi
szerokość (cm)	12	16	12
obwód brzucha (cm)	do 85	85 - 125	125 - 140
numer artykułu	R.050.619	R.060.419	R.050.519

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** medi Arm fix Maxi (pasek brzuszny 12 cm) , medi Arm fix Mini (pasek brzuszny 12 cm) , medi Shoulder fix (pasek brzuszny 16 cm)

**Kolor:** szary