

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-do-kompresji-tkanek-miekkich-genumedi-p-7816.html>



Stabilizator do kompresji tkanek miękkich Genumedi®

Numer katalogowy **9725**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator do kompresji tkanek miękkich

- Specjalny brzeg wewnętrzny na pierścień silikonowy
- System zapobiegający przesuwaniu
- Specjalnie dziana strefa komfortu w zagłębieniu kolana

Do leczenia przewlekłego pooperacyjnego i pourazowego stanu zapalnego

Genumedi to orteza na kolano z pierścieniem silikonowym. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę do prawidłowego opatrywania ran.

Zalety produktu

- Wkładka silikonowa powoduje efekt masażu
- Poprawia krążenie krwi i pomaga we wchłanianiu się krwiaków i obrzęków
- Poprawia propriocepcję i podporę mięśniową (stabilizacja kolana)

Sposób działania

Wbudowana specjalna wkładka silikonowa Genumedi odciąża rzepkę i w połączeniu z uciskiem wywieranym przez materiał powoduje efekt masażu, co z kolei poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle. Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień.

Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°.

Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wyłukać.

Instrukcja dotycząca zakładania

Grasp the support with the thumb on the internal upper end of the lateral knob adhesive bands.
Pull the support over the knee in such a way that the silicone ring covers the kneecap centrally and free of pressure.
To take off the support, grasp the lower lateral rods and pull it downwards and away.
Please take care that trained staff instruct you when putting on the support for the first time.

Wskazówki dotyczące noszenia

Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień.
Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°.
Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę.
W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.
Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

Skład produktu: Poliamide, Poliester, Eelastan, Wiskoza

Instrukcja prania

Przed praniem nie trzeba wyjmować pierścienia silikonowego. Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje i maści mogą uszkodzić materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami
- Bóle w okolicy rzepki (zespół bólowy przedniego przedziału kolana)

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy, żyłaków
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: piaskowy , srebrny