

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kolana-w-artrozie-i-osteoartrozie-greifswald-p-7817.html>



## Stabilizator kolana w artrozie i osteoartrozie Greifswald

Numer katalogowy **9726**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator kolana W artrozie i osteoartrozie

- Bezszwowe szycie
- Duża stabilność dzięki bocznym spiralnym fiszbinom
- Duży komfort noszenia

### Stabilizator kolana

medi Kniebandage to elastyczny stabilizator kolana. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego.

Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Zapewnia odciążenie podrażnionego stawu i poprawia przepływ krwi do tkanek miękkich otaczających staw poprzez wywieranie stałego ucisku i działanie masujące podczas ruchu pacjenta

#### Sposób działania

Ucisk dzianiny poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle. Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

---

Przytrzymaj opaskę za górny koniec w taki sposób, aby kciuk znajdował się od wewnątrz.  
Naciągnij opaskę na kolano tak, aby rzepka znajdowała się pośrodku elastycznej dzianiny.  
Aby zdjąć opaskę należy ją przytrzymać za dolną krawędź i ściągnąć w dół.  
Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

**Skład produktu:** Poliamide, elastan

### Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.  
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) związane z obrzękami i krwiakami

### Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy, żylaków
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** karmelowy