

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-kostki-z-nici-blizniaczej-medi-elastic-ankle-support-p-7812.html>



## Stabilizator kostki z nici bliźniaczej medi elastic ankle support

Numer katalogowy **9721**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator kostki z nici bliźniaczej

- Bezszwowe szycie
- Mała waga
- Materiał przepuszczający powietrze

### Dwustronny rozciągliwy stabilizator stawu skokowego o średnim ucisku z dopasowaną piętą

Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu skokowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

#### Zalety produktu

- Zapewnia odciążenie podrażnionego stawu i poprawia przepływ krwi do tkanek miękkich otaczających staw poprzez wywieranie stałego ucisku i działanie masujące podczas ruchu pacjenta

#### Sposób działania

Zapewnia odciążenie podrażnionego stawu i poprawia przepływ krwi do tkanek miękkich otaczających staw poprzez wywieranie stałego ucisku i działanie masujące podczas ruchu pacjenta.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Opaskę na kostkę chwycić za jej górną część (etykieta) i naciągnąć na kostkę aż pięta osiadzie się w przeznaczonej dla niej części opaski.

---

**Skład produktu:** Poliamid, elastan

### **Instrukcja prania**

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.  
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie

### **Wskazania**

- Skręcenia stawu skokowego
- Opuchlizny i wysięki śródstawowe
- Podrażnienia o podłożu reumatycznym i zwyrodnieniowym

### **Przeciwwskazania**

- Choroby lub urazy skóry w obszarze zastosowania, zwłaszcza z objawami zapalnymi (nadmierne rozgrzanie, obrzęk lub zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi nóg lub stóp (np. w przypadku cukrzycy)
- Zaburzenia odpływu chłonki oraz niejednoznaczne obrzęki tkanek miękkich, z dala od obszaru zastosowania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** kolor skóry

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI